

DESFIBRILHADOR   					Programa DAE											
					Licença Nº											
					Nº de série DAE											
					ANO											
					JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
(1) Acesso desobstruído																
(2) Abertura com código																
(3) DAE na caixa																
(4) Status DAE OK																
(5) Eléktodos conectados																
(6) Eléktodos válidos																
(7) KIT emergência																
(8) Folha de Registo Nacional PCR																
Verificado por:																
Dia da verificação																

Este documento deve ser preenchido mensalmente. Para cada item marque ✖ ou ✔ ou N/A.

EM CASO DE ANOMALIA REPORTE DE IMEDIATO À NOSSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 913 200 892

Download check-list



- (1) - Acesso desobstruído e fácil acesso ao Desfibrilhador
- (2) - Teste a abertura da caixa via introdução do código pré-definido.
- (3) - Verificar se o DAE está dentro da Caixa Mural.
- (4) - Verificar se o DAE não apresenta nenhuma luz azul ou vermelha, nem alarmes sonoros. Em correto funcionamento deverá piscar apenas uma luz verde.
- (5) - Verificar se estão presentes na parte frontal do DAE os eléctrodos
- (6) - Verificar validade dos eléctrodos.
- (7) - Verificar a existência do Kit de emergência junto do DAE.
- (8) - Verificar se existe a folha do Registo nacional de PCR no dossier

Ou através do site:

desfibrilhadordoc.pt/documentacao

No final de cada ano deverá:

- Fazer download nova check-list 🖱
- guardar este registo, para possíveis auditorias