

DESFIBRILHADOR   					Programa DAE								
JUNTOS SALVAMOS VIDAS					Licença Nº								
					Nº de série DAE								
					ANO								
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
(1) Acesso desobstruído													
(2) Chamada realizada e atendida < 1m													
(3) Abertura com código													
(4) Abertura remota													
(5) DAE na caixa													
(6) Status DAE OK													
(7) Eléktodos conectados													
(8) Eléktodos válidos													
(9) KIT emergência													
(10) Folha de Registo Nacional PCR													
Verificado por:													
Dia da verificação													

Este documento deve ser preenchido mensalmente. Para cada item marque ✖ ou ✓ ou N/A.

EM CASO DE ANOMALIA REPORTE DE IMEDIATO À NOSSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 913 200 892

Download check-list



Ou através do site:

desfibrilhador.doc.pt/documentacao

- (1) - Acesso desobstruído e fácil acesso ao Desfibrilhador
- (2) - Identificar se após pressionar botão de chamada, a mesma é efetivada e atendida em menos de 1 minuto.
- (3) - Teste a abertura da caixa via introdução do código pré-definido.
- (4) - Solicite ao operacional em linha para abrir a caixa remotamente.
- (5) - Verificar se o DAE está dentro da Caixa Mural.
- (6) - Verificar se o DAE não apresenta nenhuma luz azul ou vermelha, nem alarmes sonoros. Em correto funcionamento deverá piscar apenas uma luz verde.
- (7) - Verificar se estão presentes na parte frontal do DAE os eléctrodos
- (8) - Verificar validade dos eléctrodos.
- (9) - Verificar a existência do Kit de emergência junto do DAE.
- (10) - Verificar se existe a folha do Registo nacional de PCR no dossier

No final de cada ano deverá:

- Fazer download nova check-list 📄
- guardar este registo, para possíveis auditorias