

DESFIBRILHADOR   					Programa DAE								
					Licença Nº								
					Nº de série DAE								
					ANO								
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
(1) Acesso desobstruído													
(2) Certificado de licenciamento exposto													
(3) DAE na mala													
(4) Status DAE OK													
(5) Eléttodos conectados													
(6) Eléttodos válidos													
(7) KIT emergência													
(8) Folha de Registo Nacional PCR													
Verificado por:													
Dia da verificação													

Este documento deve ser preenchido mensalmente. Para cada item marque ✖ ou ✔ ou N/A.

EM CASO DE ANOMALIA REPORTE DE IMEDIATO À NOSSA ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 913 200 892

Download check-list



- (1) – Acesso desobstruído no acesso ao Desfibrilhador.
- (2) - Verificar a presença do certificado de licenciamento.
- (3) – Verificar se o DAE está dentro da mala de transporte.
- (4) – Verificar se o DAE não apresenta nenhuma luz azul ou vermelha, nem alarmes sonoros. Em correto funcionamento deverá piscar apenas uma luz verde.
- (5) – Verificar se estão presentes na parte frontal do DAE os eléctrodos.
- (6) – Verificar validade dos eléctrodos.
- (7) – Verificar a existência do Kit de emergência junto do DAE.
- (8) – Verificar se existe a folha do Registo Nacional de PCR, no dossier de cardioproteção

Ou através do site:

desfibrilhadordoc.pt/documentacao

No final de cada ano deverá:

- Fazer download nova check-list 🖱
- guardar este registo, para possíveis auditorias